



1019698 | P15

3bscientific.com

Тренажер навчальних дій по догляду за лежачими

ТРЕНАЖЕР НАВЫКОВ УХОДА ЗА ПРОЛЕЖНЯМИ



Введение

Вы приобрели тренажер навыков ухода за пролежнями, на котором можно демонстрировать различные стадии пролежней и проводить практические занятия студентов по отработке процедур правильного ухода за ранами и перевязки. На тренажере имеется 5 мест поражения, которые можно обсудить, классифицировать, и на которых можно тренировать навыки лечения. Можно практически отработывать и совершенствовать стандарты (например, гигиена) как часть профессионального подхода к лечению ран в сестринском деле и врачебной помощи.


Функции

Клинически установленные стадии пролежня показаны по их степеням для изучения и практики ухода за ранами в клинических условиях.

- Степень 1 (большой вертел – правый)
- Степень 2 (ягодица – правая)
- Степень 3 (ягодица – левая)
- Степень 4 (большой вертел – левый, крестец)


Комплект поставки

Тренажер навыков ухода за пролежнями (макет ягодиц)
Сумка для переноски

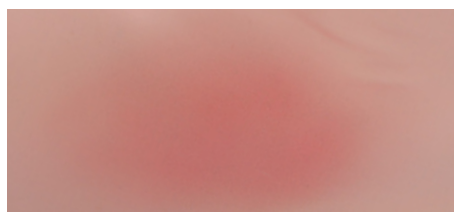


Пролежень 1 степени

На большом вертеле показан пролежень 1 степени: видно покраснение, но кожа интактна.

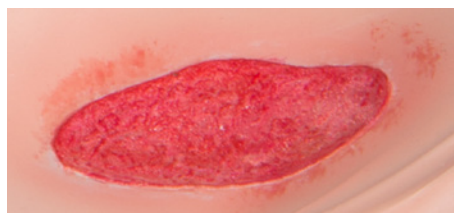


Пролежень 2 степени

В области под правой ягодицей. Видна частичная утрата кожи: наружный слой кожи (эпидермис) обнаруживает признаки повреждения, проникающие в дерму (кориум). Показанное повреждение, вызванное давлением на поверхность, может проявляться образованием пузырей и потертостей кожи.

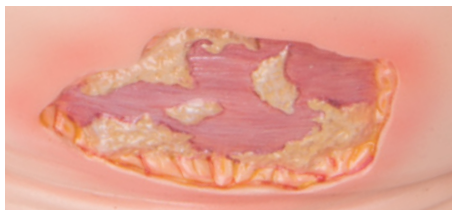


Пролежень 3 степени

В нижней области левой ягодицы виден пролежень 3 степени: проявляется утратой всех слоев кожи с повреждением подкожной ткани, вплоть до некроза. Это распознается по черному цвету раневой поверхности.

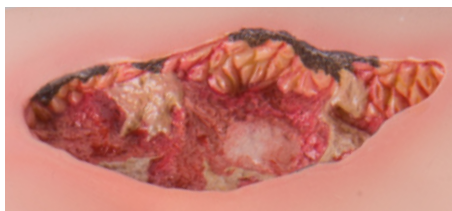

Пролежень 4 степени

Выраженный пролежень 4 степени представлен на большом вертеле (trochanter major) и на крестце (os sacrum): разрушены все слои кожи и фасции мышц. Некротические зоны выделены черным цветом. Поражены также мышцы и кости в области под этим слоем. Такое повреждение может стать некротическим. Возможно повреждение опорных структур, таких как сухожилия, связки и суставы. Можно также видеть образование карманов, более или менее протяженных. Показанные стадии пролежня можно осмотреть, измерить, а также можно отработать на них навыки лечебных процедур. На обеих имитациях 4 степени имеются раневые карманы, на которых можно также проводить диагностику и уход. Благодаря гибкой структуре использованного материала, студенты могут отбатывать наложение и смену бинтов и повязок в реалистичных условиях.

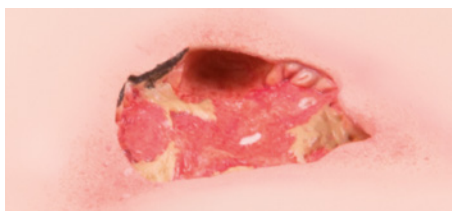

Очистка и уход

Поверхности макета можно очищать мягкой тканью. Любые остатки от пластырей можно смывать обычным средством для смывания пластырей. Прежде чем убирать тренажер на хранение, убедитесь в том, что он совершенно сухой.

Технические данные

Размеры	
Макет (В × Ш × Г):	15 × 34 × 38 см
Вес:	приблиз. 2,2 кг
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации:	-10°C ... +40°C
Температура хранения:	-20°C ... +40°C



3B Scientific

A worldwide group of companies

ООО "3Б Сайнтитфик"

196084 • Санкт-Петербург • Московский пр., д. 79А

лит. А • офис 400 • телефон (812) 3342223

факс (812) 3347150 • Sales.spb@3bscientific.com

www.3bscientific.ru

© Авторское право 2016 на руководство пользователя
и конструкцию изделия: 3B Scientific GmbH, Germany